





GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN APPROPRIÉS

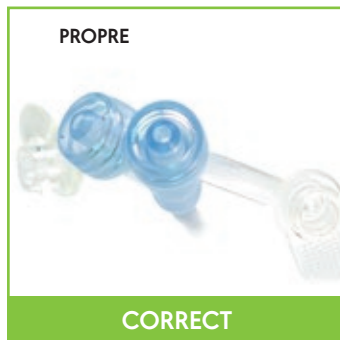


1 PROPRE : Éviter l'accumulation d'aliments dans les filets du connecteur et les capuchons. Nettoyer régulièrement à l'eau savonneuse tiède, conformément à la notice d'utilisation.

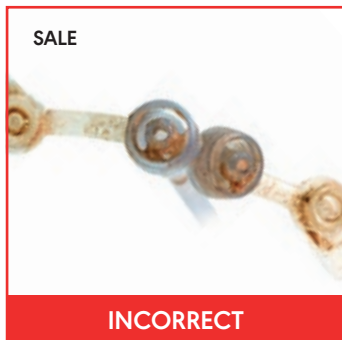

2 RACCORDÉ : S'assurer du bon raccordement pour éviter une fuite. Éviter de trop serrer le connecteur du dispositif d'alimentation. **ARRÊTER** lorsqu'un raccordement « ajusté » se fait sentir.

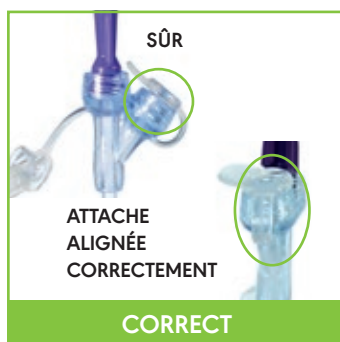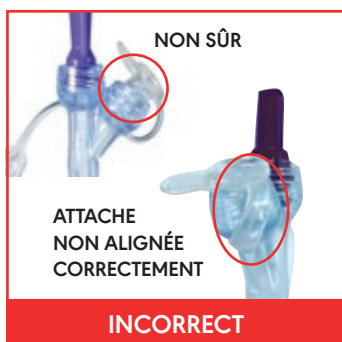



3 CAPUCHON : S'assurer que le capuchon est bien fermé en poussant dessus ou en le tournant. Pour le fermer en tournant, appuyer fermement sur le capuchon dans l'orifice. Une fois fermé, tourner le capuchon dans l'orifice pour s'assurer que l'attache est droite. Une attache en diagonale tire sur le capuchon, provoquant une tension qui pourrait entraîner une fuite.

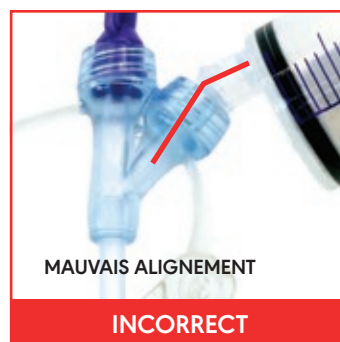

4 ALIGNEMENT : Éviter un mauvais alignement et un croisement des raccordements, en particulier avec les seringues. Il s'agit d'une mesure clé pour éviter que l'orifice d'accès ne craque et que le prolongateur ne soit endommagé.



5 AUTRES RACCORDEMENTS : Essayer d'éviter de heurter les raccordements fixés à l'autre orifice, en particulier lors de l'utilisation d'une seringue à embout excentré.

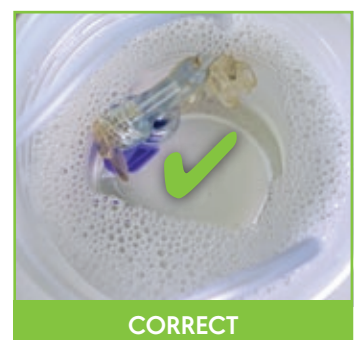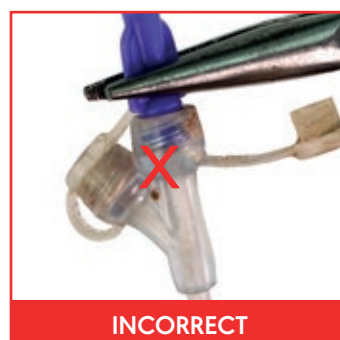

6 DÉBRANCHEMENT : Éviter de forcer pour débrancher les connecteurs ou de les débrancher avec des pinces, des clamps ou d'autres outils. Si le débranchement est impossible en raison d'un film accumulé, faire tremper dans de l'eau savonneuse tiède.

SOINS QUOTIDIENS

- Vérifiez la position du bouton de gastrostomie MIC-KEY*, à l'aide d'un papier pH, au moins trois fois par jour ainsi que chaque fois que vous connectez un nouvel emballage d'aliments ou lorsque vous n'êtes pas certain du positionnement correct de la sonde. En cas de doute, réalisez une radiographie afin de vous assurer du positionnement correct de la sonde. Rincez toujours la sonde à l'eau avant et après l'administration d'aliments ou de médicaments.
- Lavez le prolongateur MIC-KEY* à l'eau chaude et au savon après chaque utilisation. Rincez-le soigneusement et laissez-le sécher à l'air. Rangez-le dans un conteneur hermétiquement fermé ou dans un sac plastique, jusqu'à son utilisation suivante. Les prolongateurs MIC-KEY* sont jetables et doivent être remplacés au moins toutes les deux semaines.
- Pour un résultat optimal, remplacez le bouton de gastrostomie MIC-KEY* tous les trois mois².

BOUTON DE GASTROSTOMIE MIC-KEY* - L'ORIGINALE !

Avec les connecteurs ENFit®

| TAILLE (DIAMÈTRE EXTÉRIEUR) | PROFONDEUR DE LA STOMIE (Y) | CODE DU PRODUIT |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 12 Fr | De 0,8 à 4,0 | 8140-x-y |
| 14 Fr | De 0,8 à 5,0 | 8140-x-y |
| 16 Fr | De 0,8 à 5,0 | 8140-x-y |
| 18 Fr | De 0,8 à 5,0 | 8140-x-y |
| 20 Fr | De 0,8 à 5,0 | 8140-x-y |
| 24 Fr | De 1,5 à 5,0 | 8140-x-y |

Longueurs de stomie disponibles (cm):

0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3 /2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 /4,5 /5,0



ACCESSOIRES DU BOUTON MIC-KEY*

| | | CODE DU PRODUIT |
|---|-------|-----------------|
| Prolongateur MIC-KEY* ENFit® avec porte de médication et connecteur à angle droit | 30 cm | 0141-12 |
| Prolongateur MIC-KEY* ENFit® avec porte de médication et connecteur à angle droit | 60 cm | 0141-24 |
| Prolongateur MIC-KEY* ENFit® avec porte de médication et connecteur à angle droit | 5 cm | 0142-02 |
| Prolongateur MIC-KEY* ENFit® avec connecteur droit | 30 cm | 0143-12 |
| Prolongateur MIC-KEY* ENFit® avec connecteur droit | 60 cm | 0143-24 |
| Prolongateur MIC-KEY* ENFit® avec simple connecteur et connecteur à angle droit | 30 cm | 0144-12 |
| Prolongateur MIC-KEY* ENFit® avec simple connecteur et connecteur à angle droit | 60 cm | 0144-24 |
| Instrument de mesure de la stomie MIC-KEY* | - | 98460 |



1. Patient Safety Alert NPSA/2011/PSA002. 2. Jacob A. MD, et. al., Safety of the one step PEG Button in children, J. Pediatr., 2015.

AVANOS

Pour de plus amples informations, envoyez un e-mail à serviceclients@avanos.com ou visitez www.avanos.fr.

www.mic-key.com

* Marque déposée ou marque de commerce de Avanos Medical, Inc. ou ses filiales. ©2019 AVNS. Tous droits réservés.
ENFit® est une marque déposée de Global Enteral Device Supplier Association, Inc. HC219-00-FR