


AVANOS

SONDE DE GASTROSTOMIE MIC-KEY*

Fiche d'information
pour patients,
parents et soignants

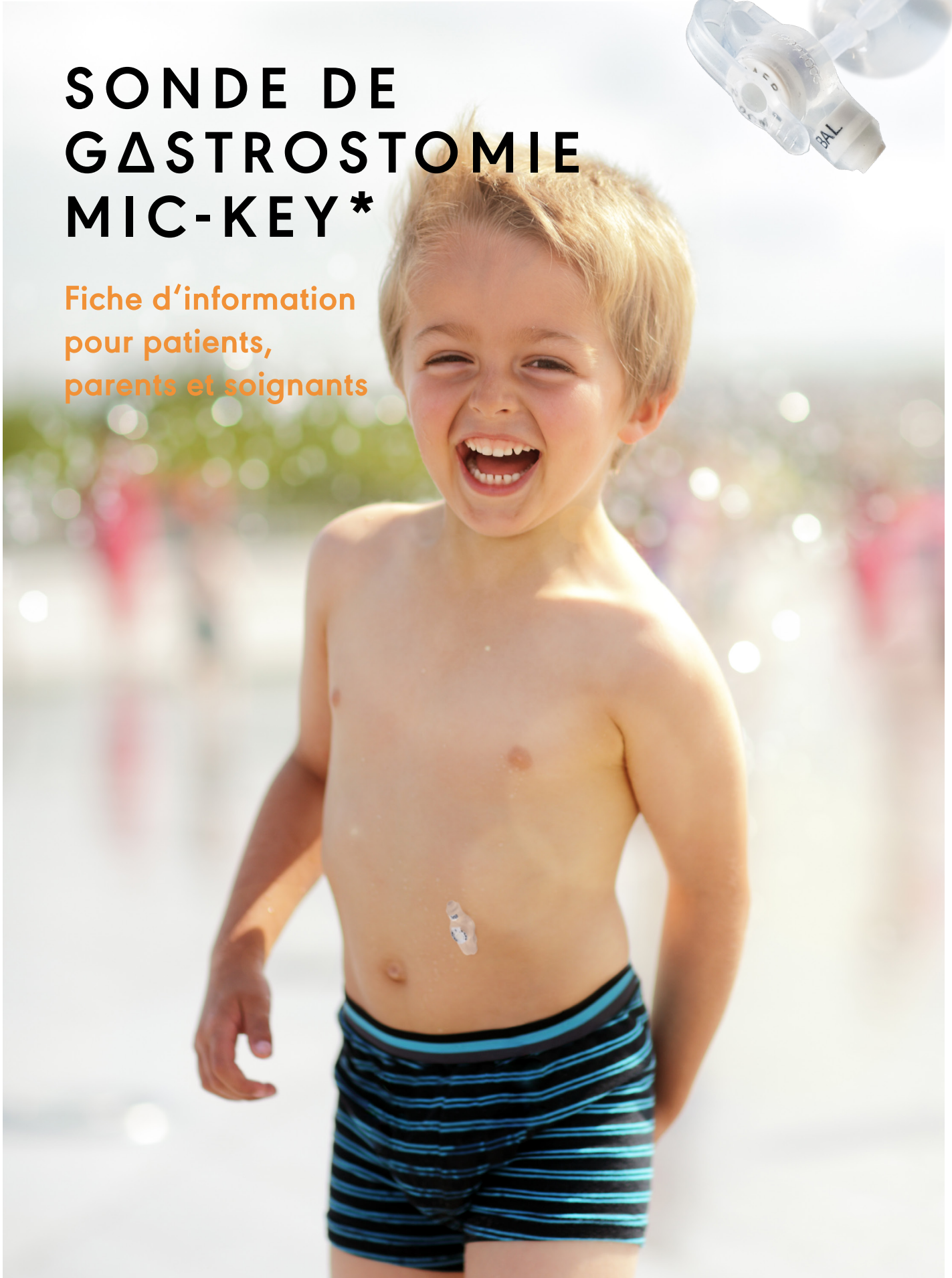


POURQUOI UNE SONDE DE GASTROSTOMIE MIC-KEY* ?

Qu'est-ce qu'une sonde de gastrostomie MIC-KEY* ?

La sonde de gastrostomie MIC-KEY* est une sonde d'alimentation à ballonnet en silicone pour l'administration de nutrition, de liquide et/ou de médicaments dans l'estomac. La sonde a un profil bas et est maintenue par un ballonnet interne gonflé à l'eau stérile.

Un prolongateur MIC-KEY* est connecté à la sonde uniquement lors de la nutrition ou de l'administration de médicaments.

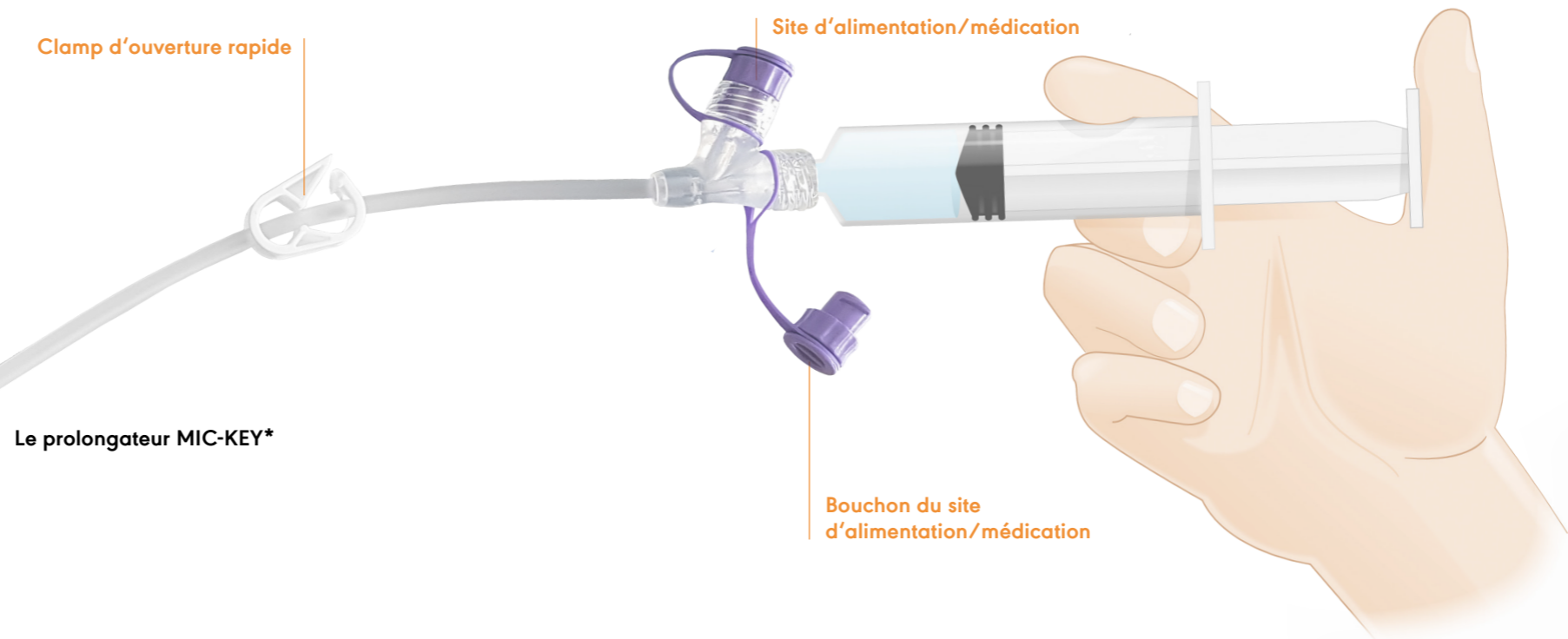

POUR TOUT SAVOIR

Avantages de la sonde de gastrostomie MIC-KEY*

- Se trouve au niveau de la peau
- L'instrument de mesure de la stomie permet une mesure précise de la profondeur de l'incision, ce qui permet un ajustement sûr
- La valve anti-retour intégrée empêche le reflux accidentel
- Prolongateur MIC-KEY* uniquement connecté pendant la nutrition ; discret
- Gamme de prolongateurs complète et flexible

Inconvénients d'une sonde de GPE ou d'une sonde d'alimentation à ballonnet standard

- Une sonde plus longue peut entraver la mobilité ; Risque accru de retrait accidentel
- Difficile à dissimuler ; souvent maintenue par de l'adhésif médical peu esthétique
- Sa forme peut être visible sous les vêtements
- Risque de déversement accidentel du contenu de la sonde
- Le poids de la sonde pèse sur le site de la stomie et peut provoquer une gêne.



M'expliquera-t-on comment entretenir la sonde de gastrostomie MIC-KEY* ?

Oui, votre infirmière vous montrera comment prendre soin de la sonde. Avant votre sortie de l'hôpital, on vous expliquera comment :

- Connecter et détacher sans danger un prolongateur et un dispositif de nutrition,
- Administrer la nutrition et la médication,
- Prendre soin de la stomie,
- Rincer la sonde suite à la nutrition ou l'administration de médicaments,
- Vérifier le contenu du ballonnet.

Votre infirmière organisera pour vous une séance de formation avec l'infirmière nutritionniste avant votre sortie de l'hôpital, pour vous permettre d'apprendre comment entretenir la sonde de gastrostomie MIC-KEY*.



Quand pourrai-je reprendre une activité normale après l'insertion de la première sonde ?

- Vous pourrez reprendre une activité normale après la sortie de l'hôpital.
- Une fois que la stomie sera cicatrisée, les trois agrafes blanches ne seront plus présentes et, avec l'approbation de votre médecin ou infirmière spécialisée, vous pourrez prendre un bain. Utiliser un savon pour peau sensible dans l'eau du bain.
- Vous pourrez nager une fois la stomie cicatrisée ; cependant, la stomie ne doit pas être infectée, éraflée ou douloureuse. Le site de la stomie et ses environs doivent toujours être nettoyés à l'eau après la nage, afin d'éviter l'irritation par le chlore ou l'eau de mer.



Où la première sonde sera-t-elle insérée ?

Soit vous avez déjà une sonde de GPE, qui sera alors retirée et remplacée par une sonde MIC-KEY*, soit la sonde MIC-KEY* peut être insérée comme sonde initiale. Les deux interventions se font dans un cadre endoscopique sous anesthésie légère, généralement en hôpital de jour.



À quelle fréquence faut-il changer la sonde ?

Nous vous conseillons de remplacer votre sonde tous les trois mois afin de maintenir un bon fonctionnement, une hygiène et une santé de la stomie optimales. Cette sonde est conçue pour fonctionner correctement 3 mois pour une utilisation normale.



Qui change la sonde de gastrostomie MIC-KEY* par la suite ?

Les changements de routine sont généralement réalisés par votre infirmière à domicile ou à l'hôpital. Dans certaines circonstances, après formation par votre professionnel de la santé, vous pourrez changer la sonde vous-même.

SECUR-LOK®
avec anneau de sécurité



Puis-je utiliser des prolongateurs d'autres marques sur la sonde de gastrostomie MIC-KEY* ?

Les prolongateurs MIC-KEY* ont été spécialement conçus pour les sites de nutrition MIC-KEY*. La compatibilité n'a été testée qu'avec nos prolongateurs MIC-KEY* et nous ne pouvons donc pas confirmer que les autres prolongateurs sont compatibles. Avanos ne garantit pas l'efficacité ni la sécurité des autres prolongateurs disponibles sur le marché, utilisés en combinaison avec notre sonde de gastrostomie MIC-KEY*.



Si je ne veux pas apprendre à changer la sonde, qui le fera ?

Vous n'êtes pas obligé d'apprendre à changer la sonde si vous ne le souhaitez pas. La sonde peut aussi bien être changée par votre infirmière à domicile ou à l'hôpital.



Que faire si la sonde se déloge accidentellement ?

Une nouvelle sonde de gastrostomie MIC-KEY* doit être rapidement insérée pour éviter que la stomie ne se referme. Ne gonflez pas le ballonnet mais fixez-le à la peau avec de l'adhésif. Ne pas utiliser la sonde. Avertissez votre infirmière ou médecin.



À quelle fréquence faut-il remplacer le prolongateur ?

Pour des raisons d'hygiène et de fonctionnalité, les prolongateurs doivent être remplacés au moins toutes les deux semaines.

REMARQUE IMPORTANTE

Les consignes ci-dessus ne sont que des recommandations pour une bonne prise en charge de la sonde. Elles ne doivent être respectées que si le médecin qui met la sonde en place ou votre hôpital local ne vous donne aucune autre instruction. Les directives d'Avanos ne remplacent en aucun cas les directives médicales ou celles des infirmières locales. La responsabilité finale du traitement doit revenir au médecin qui met la sonde en place. Tout dispositif médical comporte des risques inhérents. Veuillez consulter les indications, mises en garde, avertissements et contre-indications sur l'étiquette du produit.



Vous avez besoin d'aide ?

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre service clientèle Avanos:

Tél : 0800 91 51 93 (gratuit à partir de la France)

Fax : 0800 91 51 94 (gratuit à partir de la France)

Tél : 0800 78 775 (gratuit à partir de la BE)

Fax : 0800 78 774 (gratuit à partir de la BE)

Tél : 800 62 100 (gratuit à partir du LUX)

Fax : +32 2 461 19 58 (à partir du LUX)

serviceclients@avanos.com