


# AVANOS

## SONDE DE GASTROSTOMIE MIC-KEY\*



Règles d'or des soins quotidiens  
d'une stomie cicatrisée

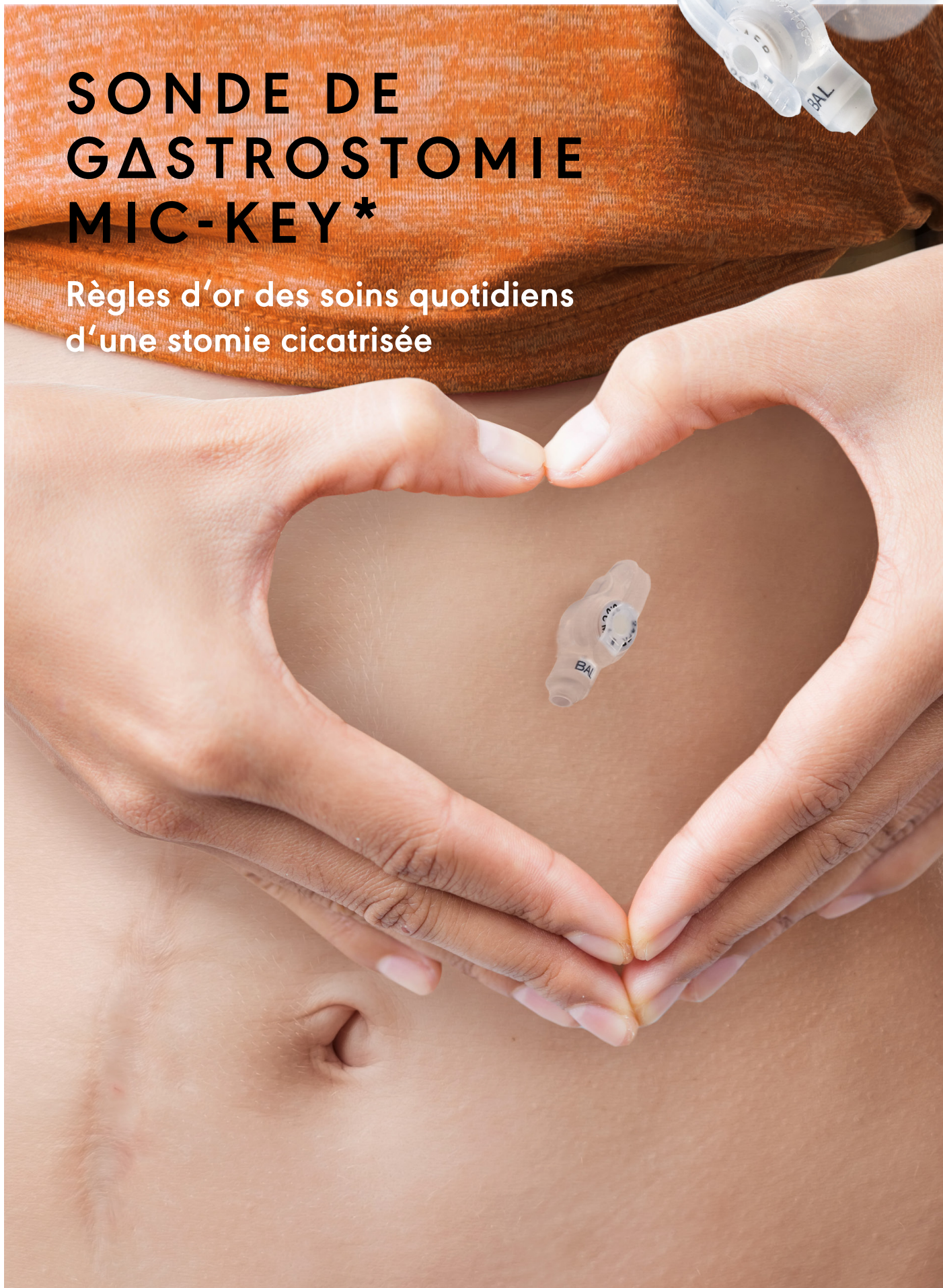

## Soins de la sonde de gastrostomie MIC-KEY\*


### Soins quotidiens

- Lavez-vous toujours les mains à l'eau et au savon, puis séchez-les avant de manipuler la sonde.
- Inspectez le site de la stomie afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes de rougeur ni d'irritation. Le cas échéant, contactez votre professionnel de santé.
- Nettoyez chaque jour la sonde et la peau alentour, à l'aide de savon doux et d'eau, puis rincez et séchez soigneusement, ou procédez selon les instructions de votre professionnel des soins de santé (1).
- Ouvrez le bouchon de la sonde et nettoyez avec soin l'extérieur du site de nutrition, à l'aide d'un coton-tige (2).
- N'utilisez pas de pansements sous la sonde de gastrostomie MIC-KEY\*, sauf indication clinique.

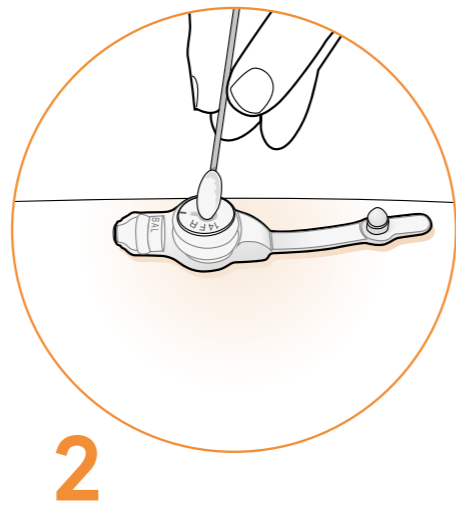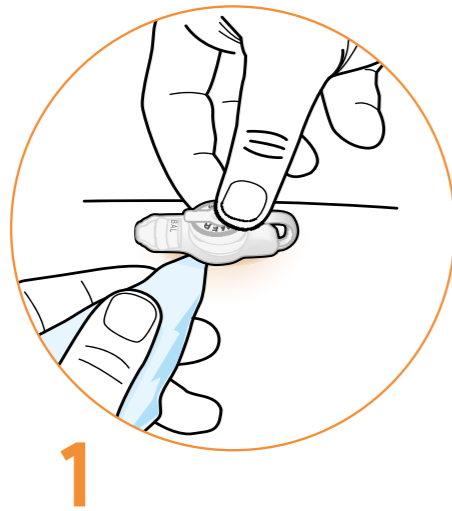


### Toutes les 2 semaines

- Vérifiez le volume d'eau dans le ballonnet toutes les deux semaines.

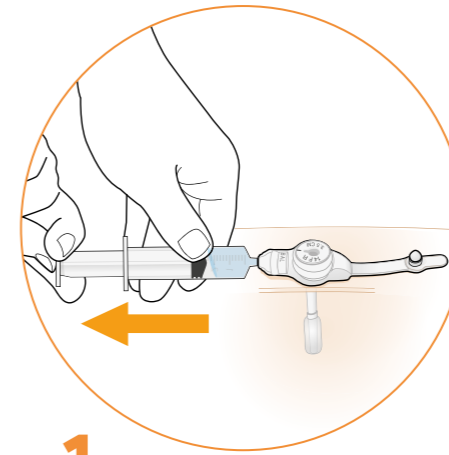

1

Pour ce faire, connectez la seringue Luer Slip au site du ballonnet et retirez toute l'eau, tout en laissant la sonde de nutrition en place.

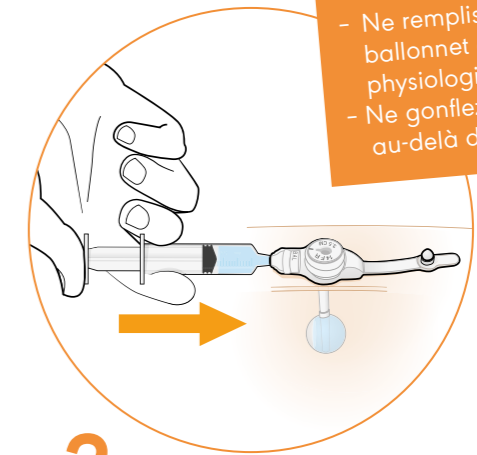

2


Si la quantité de liquide est inférieure à la quantité de départ prescrite, réinjectez le liquide et ajoutez de l'eau stérile ou distillée jusqu'à atteindre la quantité prescrite.

- Ne remplissez jamais le ballonnet d'air ni de sérum physiologique.  
- Ne gonflez pas le ballonnet au-delà du volume maximal.

- Avant de nettoyer la sonde de gastrostomie MIC-KEY\*, faites-la délicatement tourner à 360° plus un quart de tour dans la stomie.
- Remplacez le prolongateur par un nouvel exemplaire.




## Fixation de la sonde de gastrostomie MIC-KEY\* Prolongateur

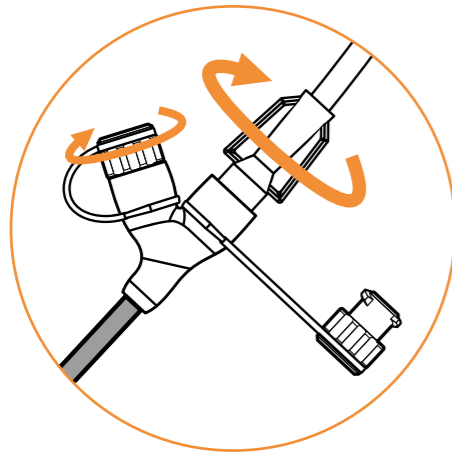


1

Connectez le prolongateur au dispositif de nutrition, puis remplissez la tubulure d'aliment, jusqu'à 2 à 3 cm de l'extrémité. Fermez le clamp du dispositif de nutrition ainsi que le clamp d'ouverture rapide.

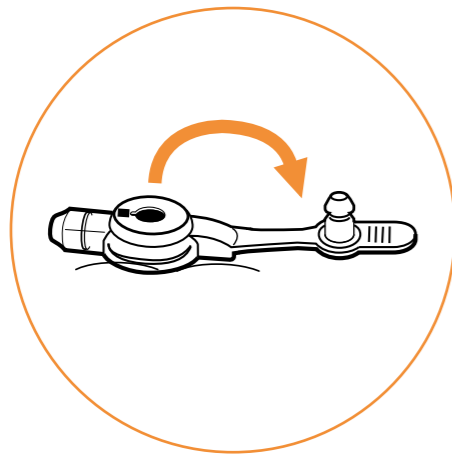


2

Ouvrez le bouchon de la sonde de gastrostomie MIC-KEY\*.

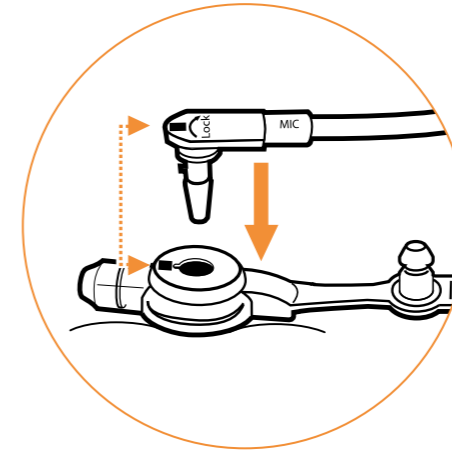

3

Alignez le repère noir du prolongateur et le repère noir de la sonde, puis insérez le « nez » du connecteur SECUR-LOK\* dans le site de nutrition.

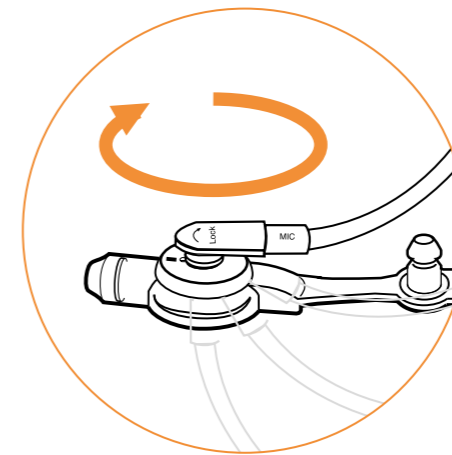


4


Faites-le tourner d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

5

Démarrez la nutrition en ouvrant le clamp et le clamp d'ouverture rapide blanc. Le cas échéant, mettez la pompe de nutrition en marche.

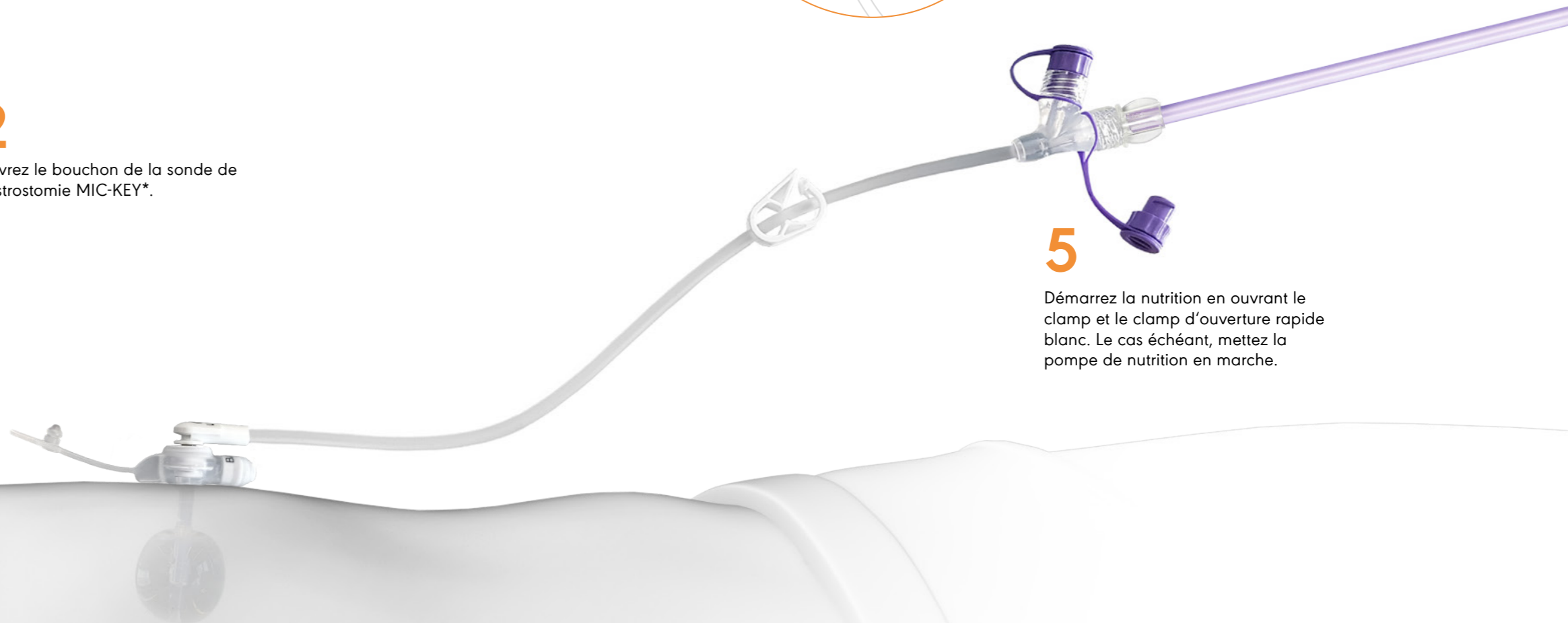


## Retrait du prolongateur MIC-KEY\*

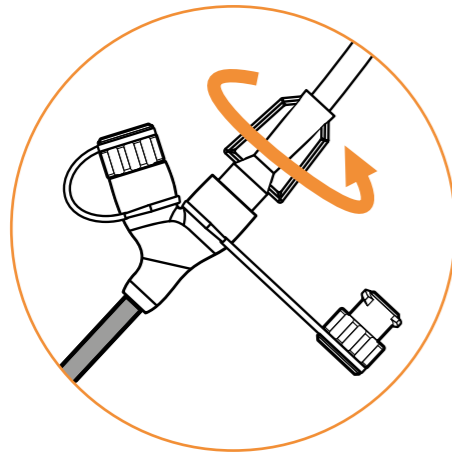


1

Il est recommandé de déconnecter le prolongateur de la sonde de gastrostomie MIC-KEY\* après la nutrition. Procédez comme suit : déconnectez le dispositif de nutrition du prolongateur.

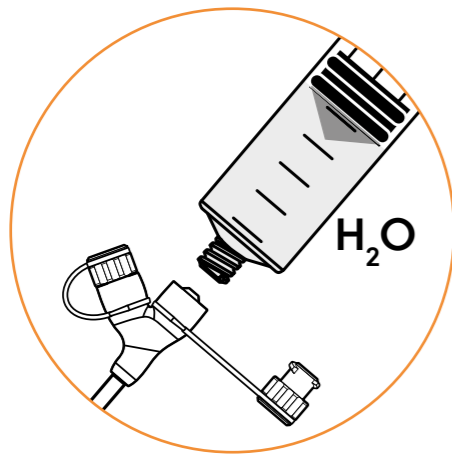


2

À l'aide de votre seringue ENFit®, rincez le prolongateur avec 10 à 20 ml d'eau (ou moins si vous êtes sensible au volume. Consultez votre professionnel de santé.)

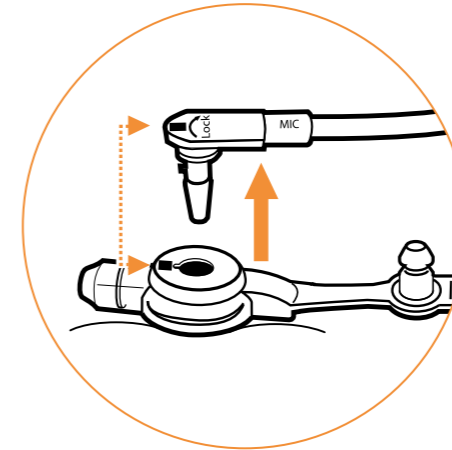

3

Déconnectez le prolongateur de la sonde de gastrostomie MIC-KEY\*, en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère noir du site de nutrition soit aligné avec le repère noir du prolongateur.

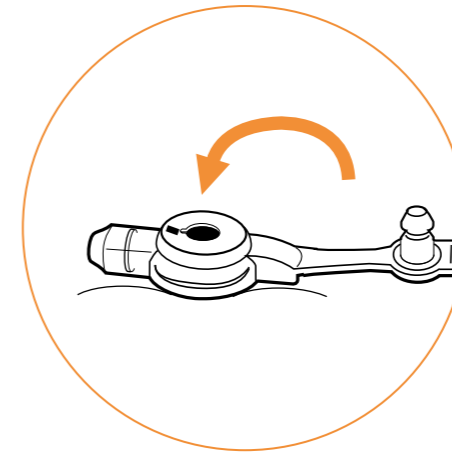

4

Retirez délicatement le prolongateur et remplacez le capuchon sur la sonde MIC-KEY\*.

### Entretien et rangement du prolongateur MIC-KEY\*

- Lavez le prolongateur à l'eau chaude et savonneuse immédiatement après chaque usage.
- Rincez-le soigneusement et rangez-le dans un endroit propre et sec.
- Pour des raisons d'hygiène et de fonctionnalité, ce prolongateur doit être remplacé au moins toutes les deux semaines.



## Conseils et astuces

- N'administrez pas d'aliment par la sonde si vous n'êtes pas certain que celle-ci est correctement en place. Vérifiez le positionnement correct de la sonde à l'aide des méthodes recommandées par votre professionnel des soins de santé.
- Assurez-vous toujours d'avoir une sonde de remplacement sous la main. Si votre sonde se détache accidentellement, la nouvelle doit être mise en place immédiatement. Insérez-la dans la stomie, mais ne gonflez pas le ballonnet, car cette opération doit être réalisée par un professionnel des soins de santé. Collez la sonde sur la peau à l'aide de ruban adhésif. Cessez immédiatement d'administrer l'aliment et contactez votre professionnel des soins de santé.
- N'utilisez pas de compresses sous la sonde de gastrostomie MIC-KEY\*.
- Rincez toujours la sonde à l'eau avant et après l'administration d'aliment ou de médicaments.
- Ne gonflez pas le ballonnet de manière excessive.
- Votre professionnel de santé vous aidera à déterminer le moment auquel remplacer votre sonde de gastrostomie MIC-KEY\*. Nous vous conseillons de remplacer votre sonde tous les trois mois afin de préserver son bon fonctionnement, ainsi qu'une hygiène et une santé de la stomie optimales. Votre sonde a été conçue afin de fonctionner correctement pendant trois mois d'utilisation normale (cf. instructions d'utilisation).

## Administration de médicaments

- Remplissez la seringue ENFit® d'eau, puis connectez-la au prolongateur et remplissez celui-ci d'eau jusqu'à 2 à 3 cm de l'extrémité. Fermez le clamp d'ouverture rapide et connectez le prolongateur à la sonde de nutrition. Déconnectez la seringue du prolongateur et videz-la.
- Écrasez le médicament (comprimés ou gélules) et mélangez-le à de l'eau tiède ou selon les instructions de votre pharmacien.
- Aspirez le contenu dans la seringue ENFit®. Connectez le prolongateur, ouvrez le clamp d'ouverture rapide et injectez le contenu dans la sonde.
- Refermez le clamp, déconnectez la seringue, puis remplissez-la d'eau et rincez à nouveau.
- Déconnectez le prolongateur et fermez le bouchon. Nettoyez comme décrit précédemment.
- Ne mélangez jamais plusieurs médicaments. Administrez-les toujours l'un à la suite de l'autre, après avoir rincé le prolongateur à l'eau.

## En cas de question :

Infirmier/ère en appui  
nutritionnel de l'hôpital :

Téléphone :

Organisation de soins  
à domicile :

Téléphone :

Infirmier/ère à domicile :

Téléphone :

Diététicien(ne) :

Téléphone :

## REMARQUE IMPORTANTE

Les consignes ci-dessus ne sont que des recommandations pour une bonne prise en charge de la sonde. Elles ne doivent être respectées que si le médecin qui met la sonde en place ou votre hôpital ne vous donne aucune autre instruction. Les directives d'Avanos ne remplacent en aucun cas les directives médicales ou infirmières locales. La responsabilité finale du traitement doit revenir au médecin qui met la sonde en place. Tout dispositif médical comporte des risques inhérents. Pour connaître les indications, les mises en garde, les avertissements et les contre-indications, veuillez consulter la notice du produit.

Pour de plus amples informations, envoyez un e-mail à [serviceclients@avanos.com](mailto:serviceclients@avanos.com) ou visitez [www.avanos.fr](http://www.avanos.fr).

\* Marque déposée ou marque d'Avanos Medical, Inc., ou de ses affiliés. ©2020 AVNS. Tous droits réservés. ENFit® est une marque déposée ou une marque de Global Enteral Device Supplier Association, Inc. Utilisée avec son autorisation. HC224-00-FR COPY-04362