


ΔVΔNOS

SONDE DE GASTROSTOMIE MIC-KEY*

Règles d'or du
remplacement

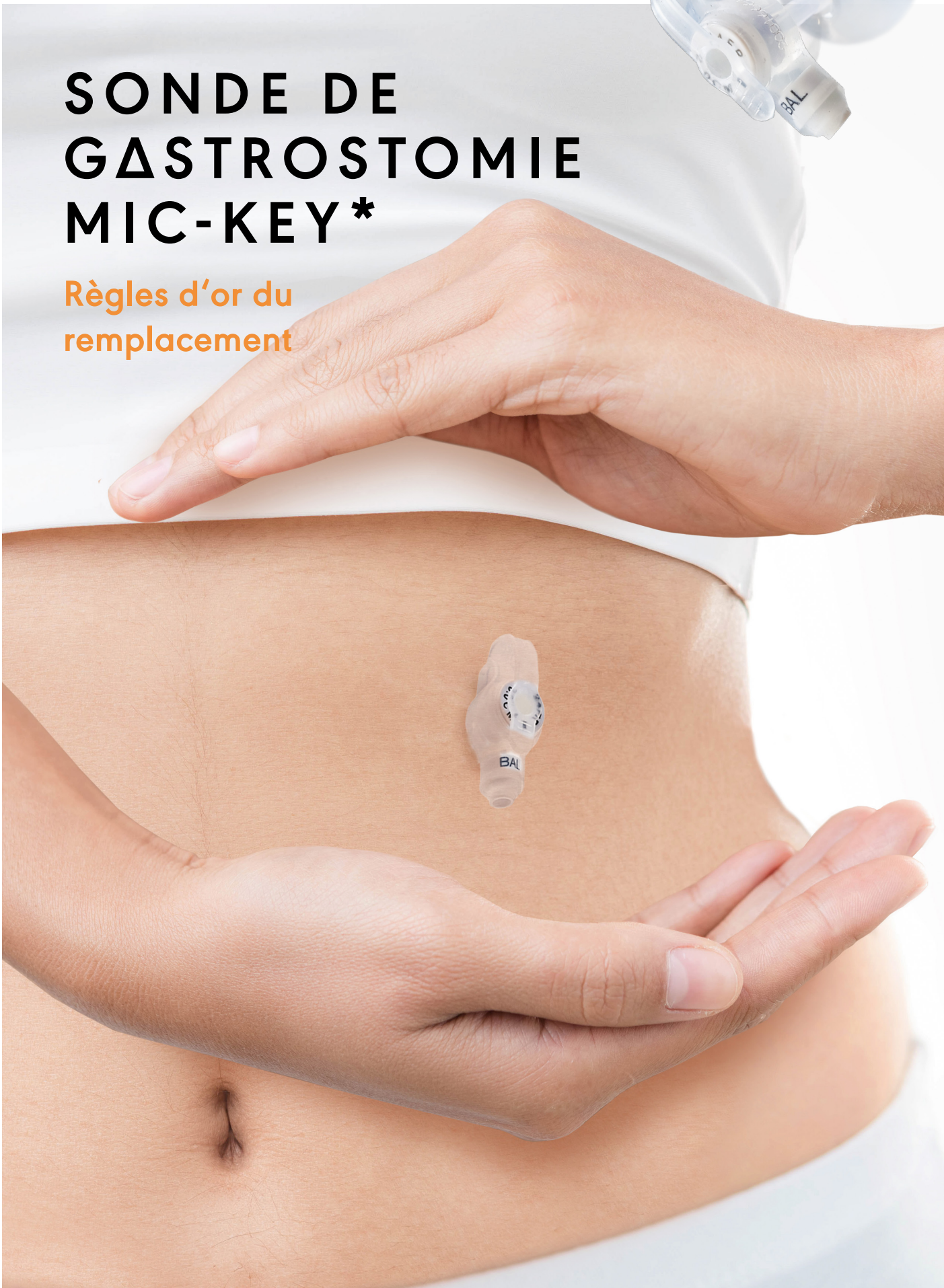

Remplacement de la sonde de gastrostomie MIC-KEY*

Quand ?

- Votre professionnel de santé vous aidera à déterminer le moment où il est nécessaire de remplacer votre sonde de gastrostomie MIC-KEY*. Nous vous conseillons de remplacer votre sonde tous les trois mois afin de préserver son bon fonctionnement, ainsi qu'une hygiène et une santé de la stomie optimales.
- Moyennant une formation correcte dispensée par votre professionnel de santé et dans certaines conditions, vous pouvez remplacer la sonde vous-même. N'essayez pas de remplacer la sonde de gastrostomie MIC-KEY* si vous n'avez pas suivi de formation et si un professionnel de santé estime que vous ne disposez pas des compétences requises.


Matériel nécessaire

- Nouvelle sonde de gastrostomie MIC-KEY* avec prolongateur et seringue ENFit®
- Seringue Luer Slip
- Compresses
- Lubrifiant
- Eau stérile
- Bandelette indicatrice de pH
- Facultatif : instrument de mesure de la stomie




Comment ?

- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon, puis séchez-les avant de remplacer la sonde de gastrostomie MIC-KEY*. Assurez-vous que le patient est confortablement allongé sur le dos.

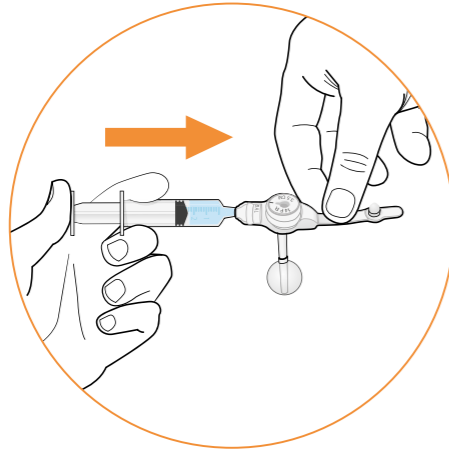


1

Remplissez le ballonnet de la nouvelle sonde de 5 ml d'eau stérile ou distillée (12 Ch = 3 ml) afin d'en vérifier l'intégrité (forme et fuites). Retirez l'eau du ballonnet.

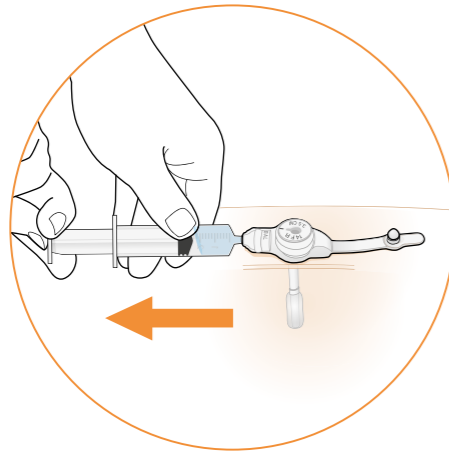


2

Connectez une seringue Luer Slip vide à la valve du ballonnet de la sonde de gastrostomie MIC-KEY* qui se trouve dans l'estomac du patient. Tirez sur le piston jusqu'à ce que toute l'eau soit extraite du ballonnet.

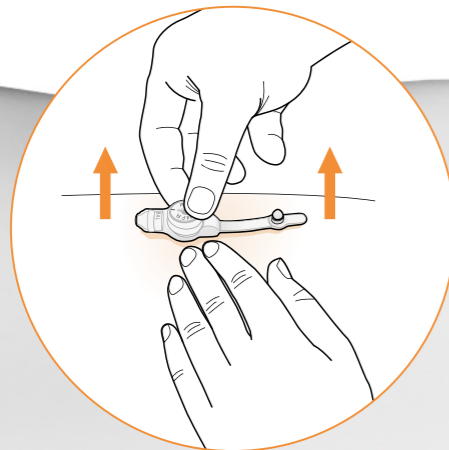

3


Retirez délicatement la sonde de gastrostomie MIC-KEY* de l'estomac du patient, en exerçant un mouvement de rotation.

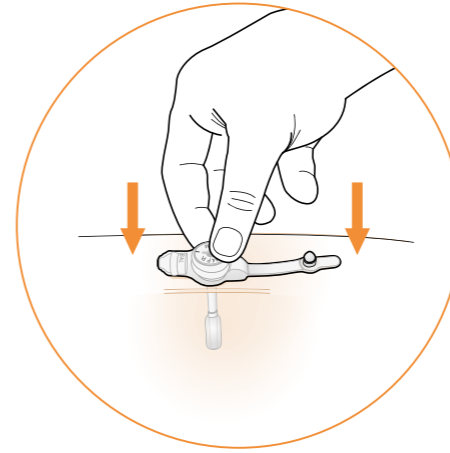

4

Appliquez un lubrifiant hydrosoluble sur l'extrémité de la nouvelle sonde de gastrostomie MIC-KEY*.

Introduisez avec prudence la nouvelle sonde dans la stomie. Faites avancer la sonde de gastrostomie MIC-KEY* jusqu'à ce qu'elle repose à plat sur la peau.

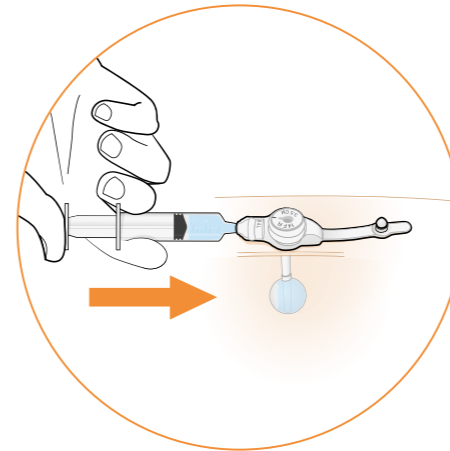

5

Maintenez la sonde en place et remplissez le ballonnet de 5 ml (3 ml pour une taille Charrière 12) d'eau stérile ou distillée. Ne remplissez jamais le ballonnet au-delà du volume maximal.



- Amenez le ballonnet contre la paroi de l'estomac, en tirant très délicatement sur la sonde de gastrostomie MIC-KEY* jusqu'à ce qu'elle se bloque.
- Essuyez le liquide ou le lubrifiant présent sur la sonde et la stomie.
- Assurez-vous que la sonde est positionnée correctement. Insérez un prolongateur dans le site de nutrition, aspirez le contenu gastrique résiduel et mesurez le pH de ce dernier à l'aide d'une bandelette indicatrice de pH. Le pH doit être égal ou inférieur à 5,5. En cas de doute, consultez votre médecin ou vérifiez à l'aide d'une radiographie.
- Si le pH est $\leq 5,5$: réinjectez le contenu gastrique, rincez la sonde à l'eau et commencez la nutrition.
- N'essayez pas d'utiliser la sonde si le pH est $\geq 5,5$, consultez un médecin.



Mesurez la longueur de la stomie lors du remplacement de la sonde :

- Si vous développez un des problèmes suivants, consultez votre professionnel de santé et demandez-lui de mesurer la longueur de votre stomie à l'aide de l'instrument de mesure de la stomie MIC-KEY* :
 - a. Gain ou perte de poids important.
 - b. Pincement ou serrement provoqué par la sonde.
 - c. Impression que la sonde ne tient pas bien en place et/ou fuite au niveau de la stomie.
 - d. Stomie inconfortable et/ou irritée.
 - e. La sonde ne tourne pas lors de l'entretien de routine.

Procédez comme suit :

- Allongez le patient sur le dos et retirez la sonde actuelle (comme décrit précédemment).
- Lubrifiez l'instrument de mesure de la stomie MIC-KEY* à l'aide d'un lubrifiant hydro-soluble, puis introduisez-le dans la stomie et remplissez le ballonnet avec 3 ml d'eau.
- Tirez délicatement l'instrument de mesure vers le haut, faites glisser le disque de mesure jusqu'au niveau de la peau et lisez l'indication au sommet du disque.
- Faites glisser le disque vers le haut et redressez le patient. Faites à nouveau glisser le disque vers la stomie et lisez l'indication au sommet du disque.
- Notez la moyenne des deux mesures.
- Retirez lentement les 3 ml d'eau, puis ôtez délicatement l'instrument de mesure de la stomie.
- Confirmez la position correcte de la sonde de gastrostomie MIC-KEY* dans l'estomac, en mesurant le pH avant son utilisation (le pH doit être $\leq 5,5$).

Attention :

N'essayez pas d'introduire une nouvelle sonde de gastrostomie MIC-KEY* si :

- la sonde précédente s'est détachée et vous ne savez pas depuis combien de temps elle n'est plus en place ;
- la stomie semble se refermer ;
- vous n'avez pas suivi de formation sur la manière de réintroduire la sonde de gastrostomie MIC-KEY*.

Dans de tels cas, seul un médecin peut remplacer la sonde.

En cas de question :

Infirmier/ère en appui
nutritionnel de l'hôpital :

Téléphone :

Organisation de soins
à domicile :

Téléphone :

Infirmier/ère à domicile :

Téléphone :

Diététicien(ne) :

Téléphone :

REMARQUE IMPORTANTE

Les consignes ci-dessus ne sont que des recommandations pour une bonne prise en charge de la sonde. Elles ne doivent être respectées que si le médecin qui met la sonde en place ou votre hôpital ne vous donne aucune autre instruction. Les directives d'Avanos ne remplacent en aucun cas les directives médicales ou infirmières locales. La responsabilité finale du traitement doit revenir au médecin qui met la sonde en place. Tout dispositif médical comporte des risques inhérents. Pour connaître les indications, les mises en garde, les avertissements et les contre-indications, veuillez consulter la notice du produit.

Pour de plus amples informations, envoyez un e-mail à serviceclients@avanos.com ou visitez www.avanos.fr.